

## FICHE TECHNIQUE

### « Piégeur » de l'air expiré avec valve anti-retour et filtre anti-microbien pour Analyseur de CO de l'air expiré



- **Équipé d'une valve anti-retour** : Empêche les infections croisées et garantit une sécurité optimale.
- **Filtre anti-microbien** : Absorbe l'humidité lors de l'expiration, tout en offrant une protection efficace contre les micro-organismes. Une fois sorti de son sachet individuel, le filtre reste efficace pendant un mois.
- **Économie de temps et de produits** : Grâce à sa conception, il élimine la nécessité de désinfection fréquente et l'achat de produits supplémentaires, le rendant ainsi à la fois économique et pratique.
- **Filtrage du monoxyde de carbone (CO)** : Il piège la fin de l'air expiré, qui est la partie la plus concentrée en CO
- **Conditionnement économique** : Vendu par boîte de 12 filtres, soit une utilisation pendant un an.

Référence	D-PIECE 3
Composition	Polypropylène (Plastique catégorie 5 recyclable non biodégradable)
Équipement	Valve anti-retour et filtre anti-microbien
Validité	1 mois (sorti de son sachet)
Dimension	80 mm (embouchure : 10 x 20 mm)
Couleur	Blanche
Conditionnement	Boîte de 12 – dimension : 90 x 66 x 90 mm
Emballage piègeur & boîte	Plastique, papier & carton recyclables
Marque	Bedfont Scientific - Angleterre

Nous rappelons que le filtre antimicrobien du piègeur a une validité d'un mois après l'ouverture du sachet individuel, quel que soit le nombre de personnes présentes lors d'une consultation « normale ». Cependant, lors des journées de campagnes anti-tabac, où un grand nombre de personnes sont accueillies, il est recommandé d'utiliser deux, voire trois piègeurs, afin d'éviter la saturation en humidité du filtre. Il est également conseillé de retirer le piègeur pour aérer la cellule électrochimique à l'air libre, puis de le repositionner

**RESPUR MEDICAL SAS**

26 rue Félix Rouget - 95490 VAURÉAL – France

☎ : 01 30 73 45 32 - [contact@respur-medical.com](mailto:contact@respur-medical.com) - [www.respur-medical.com](http://www.respur-medical.com)

Siret 939 027 298 00016